

Dashboard Handbuch

Version: 9. März 2021



Zaailand 106 Z, 8911 BN Leeuwarden, Nederland - Email: info@reducept.com - Tel: +31 85 13 08 260 - KvK: 74239678 - BTW: NL859821432B01

Dashboard

Das Reducept-Dashboard, oder auch Reducept - Armaturenbrett, wurde speziell für Therapeuten und Ärzte entwickelt. Über das Dashboard können Sie verschiedene Benutzer und Geräte verwalten und die Leistung der verschiedenen Spieler, die Sie behandeln, sehen.

Inhalt

Gut zu wissen, bevor Sie anfangen!	3
Zugriff auf das Dashboard	5
Wie man neue Spieler erstellt	6
Wie man die Spieler-Statistiken anzeigt	8
Wie man Geräte hinzufügt	10
Wie man Spieler auf einem Oculus-Go Apparat an- und abmeldet	12
Wie man die private Nutzung erlaubt	14
Wie man eine Lizenz erneuert	17
Wie man die Spracheinstellungen ändert	20
Wie man mehrere Spieler auf einmal löscht	21
Wie man die Daten sortiert	23

Page 2/24

Gut zu wissen, bevor Sie anfangen!

Toll, dass Sie Reducept ausprobieren! Wir werden Ihnen hier ein wenig über das Produkt erzählen und gleich danach finden Sie eine Anleitung, wie Sie das Dashboard von Reducept nutzen können.

Zielgruppe

Reducept wurde für Menschen mit chronischen Schmerzen entwickelt. Chronische Schmerzen sind definiert als anhaltende oder wiederkehrende Schmerzen, die länger als die normale Heilungszeit einer Krankheit oder Verletzung oder länger als drei bis sechs Monate andauern. Reducept wurde an Menschen im Alter von 18 bis 80 Jahren getestet. Bei jüngeren Kindern liegen keine Daten zur Wirksamkeit des Produktes vor. Bei Personen ab 65 Jahren wird oft Hilfe benötigt, um das Programm zu installieren und sich mit ihm vertraut zu machen, aber danach können auch ältere Personen mit dem Programm Verbesserungen erzielen.

Mögliche Risiken

Sie verwenden Reducept auf eigene Gefahr. Die App selbst birgt zum jetzigen Zeitpunkt nur wenige bekannte Risiken. Es ist jedoch möglich, dass das Spielen auf dem VR-Headset für Ihre Patienten unangenehm ist. Wenn Ihr Patient beim Spielen stärkere Schmerzen verspürt, lassen Sie Ihn sofort aufhören zu spielen und lassen Sie sich durch ihn benachrichtigen.

Zu möglichen Risiken beim Spielen auf dem VR-Headset empfehlen wir Ihnen, das Handbuch Ihres eigenen VR-Headset zu lesen.

Es ist auch möglich, dass Ihrem Patienten beim Spielen schwindlig wird. Wenn dies der Fall ist, lassen Sie den Patienten aufhören zu spielen und lassen Sie sich durch ihn benachrichtigen.

Trotz des psychosozialen Ansatzes von Reducept und des geringen Risikos der Intervention gibt es einige Kriterien, die bei der Anwendung von Reducept beachtet werden sollten. Wir empfehlen Reducept nicht zu verwenden bei:

- Psychotische Störungen: Jede Störung, bei der ein Patient Schwierigkeiten hat, zwischen der Realität und der fiktiven VR-Welt zu unterscheiden, kann potenziell zu einer Zunahme der Verwirrung führen
- Demenz: Jede Störung, bei der der Patient Schwierigkeiten hat, zwischen der realen Welt und der fiktiven VR-Welt zu unterscheiden, kann möglicherweise zu einer Zunahme der Verwirrung führen
- Psychiatrische Komorbidität: Es wird empfohlen, vor der Anwendung von Reducept eine psychiatrische Komorbidität zu behandeln.

Page 3/24

- Unter 18 Jahren: Reducept wurde für Erwachsene entwickelt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels werden Machbarkeitsstudien zur Anwendung von Redcuept bei Jugendlichen durchgeführt
- Audiovisuelle Störungen: wenn sie die Nutzung von VR beeinträchtigen

Aktueller Stand der Forschung

Innerhalb von Reducept verwenden wir verschiedene psychologische Behandlungstechniken. Zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapie, Akzeptanz- und Commitment-Therapie, Achtsamkeit und Hypnotherapie¹. Diese Techniken sind in der Vergangenheit ausgiebig erforscht worden und haben sich als effektiv erwiesen.

Virtual Reality (VR) wurde in letzter Zeit ebenfalls als effektive Behandlungstechnik mit vielversprechenden Ergebnissen erforscht.

Reducept hat sich dafür entschieden, die gut erforschten psychologischen Behandlungstechniken mit VR zu kombinieren. Derzeit laufen mehrere Studien, um den Erfolg von Reducept zu untersuchen.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website: reducept.com/de/forschung.

CE-Kennzeichnung

Reducept hat ein CE-Kennzeichen. Dieses Kennzeichen bescheinigt, dass das Produkt den geltenden Vorschriften im Europäischen Wirtschaftsraum entspricht. Die CE-Nummer lautet: 2019/682-01

¹ Fennema & Zantema, 2019

Page 4/24

Zugriff auf das Dashboard

- 1. Reducept schickt eine E-Mail mit einer Einladung zur Einrichtung eines Kontos auf dem Dashboard. Klicken Sie auf den Link, um zum Dashboard zu gelangen.
- 2. Wählen Sie ein Passwort und bestätigen Sie Ihr Passwort auf dem Anmeldebildschirm.

Hi Reducepter	
Email Adress	
Password	
LOGIN Forgot password?	

3. Sie sehen nun den Startbildschirm des Dashboards mit einer Übersicht über die Aktivitäten Ihrer Spieler im vergangenen Monat.

Reduc	cept dashboard		
ME	40	Dashboard	
n MY ⊥	Home ORGANISATION Players	Activity the fast month Total number of players: 192 Total playtime: 2 days	
e 6	Player groups Staff Devices		
鶞	My organisation		

Wie man neue Spieler erstellt

1. Öffnen Sie das Menü 'Players' unter 'My organization'.

Reduc	cept dashboard		Ð	1
MEN	10	Dashboard		
A MY	Home	Activity the last month		
1	Players	Total number of players: 202 Total playtime: 2 days		
25	Player groups			
Θ	Staff			
60	Devices			
醌	My organisation			

2. Sie sehen nun eine Übersicht aller mit Ihrer Organisation verbundenen Spieler. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Add player'.

Reducept dashboard						
MENU	Licenses: 3 / 10 per month	(until 27 September 2020)				
Home MY ORGANISATION	Players			- 51	Q	ADD PLAYER
2 Players	First name	Last name	Group	Last used 🖖	Active until	Actions
Player groups	213	123			27 Mar 2021	OPEN
Statf	Daniel	Jack			17 Dec 2020	OPEN
My organisation	Tom Tom	Bolten			17 Dec 2020	OPEN
	Jack	Downing			17 Dec 2020	OPEN
					Hows per page 10 =	1-4 of 4 < >

 In der Spielerübersicht erscheinen mehrere leere Eingabefelder. (HINWEIS: Wenn die private Nutzung nicht aktiviert ist, ist die E-Mail nicht erforderlich)

Page 6/24

First name*	Last name *
Email*	
Group	
Group	

4. Geben Sie die Details des neuen Spielers ein und speichern Sie die Eingabe über die Schaltfläche 'Save'.

First name *	Last name *
Jack	Ryan
Email	
Group	
Allow home usage	HOME USAGE DISABLED

5. Der neue Spieler wurde hinzugefügt und erscheint auf der Spielerübersicht.

Q	Ryan		×		۵ 💷	T ADD PLAYER
	First name	Last name	Group	Last used 4	Active until	Actions
]	Jack	Ryan			10 Dec 2020	OPEN

Page 7/24

Wie man die Spieler-Statistiken anzeigt

1. Öffnen Sie das Menü 'Players' unter 'My organization''.

Redu	cept dashboard		۲	*
ME	NU	Dashboard		
♠	Home	Activity the last month		
1	Players	Total number of players: 202 Total playtime: 2 days		
25	Player groups			
θ	Staff			
50	Devices			
ű.	My organisation			

2. Klicken Sie auf den Knopf "Open" des Spielers, für den Sie Statistiken anzeigen möchten.

Reducept dashboard						
MENU	Licenses: 3 / 10 per month	(until 27 September 2020)				
Home MY ORGANISATION	Players		-	10000004	Automation and	
2 Players		Lest name	Group	Less used	Active ditta	Actions
Player groups	213	123			27 Mar 2021	OPEN
Staff Staff Devices	Daniel	Jack			17 Dec 2020	OPEN OPEN
翻 My organisation	Tom	Botten			17 Dec 2020	OPEN
	Jack	Downing			17 Dec 2020	OPEN
					Hows per pag	u 10 - 1-4 of 4 < >

3. Sie sehen nun eine Statistik mit einer Zusammenfassung der Sitzungen, die dieser Spieler bisher innerhalb des gewählten Zeitraums gespielt hat.

n Here	Period selection
MY CHIGADUBATION	
- Payan	And the second sec
A sur	
Ca Deeres	
ina	Source 12 Section 12 S
_	Statisfield Names of assesse 112 Table Japane 111 man Add Meetige and per source 7.40
_	And the second s

4. Sie können Statistiken aus einem bestimmten Zeitraum anzeigen, indem Sie das Anfangs- und Enddatum des gewünschten Zeitraums unter 'Period Selection' eingeben. Sie sehen nun die Spieler-Statistiken aus der gewünschten Periode.

		Date Iron 22-07-2	1020			Colorenti Os.00-2020
	<	J	luly 2020		>	Rebat .
	- this	Tile Mad	062.0	n n	Child	
(A CONTRACTOR)		4	2	3 4	5	
		7 8		10 11	12	
11		14 15	16	17 10	10	
	30			34 96		
	97			997 - 1999 997 - 1999		
	65	79.5 44	100			
Unimary the seriad from 20 July 2020 to 8 5k croose in poin was 0.21.	optember 202	Ø patient he	as, over t	ino patura	e of 44 sessions.	played Reducent for a total of 18 hours. The average pain score of the beginning of these sessions was 7.65. The average pain score at the end of these aecours was 7.44. The average
atistics						
tber al sessions, 44 4 playtime: 18 hours rage start pain score, 7,65 rage end pain score, 7,44						

Page 9/24

Wie man Geräte hinzufügt

Wenn Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen an Ihrem VR-Headset, Android oder iPhone anmelden, wird es automatisch zum Dashboard hinzugefügt.

Es kann nützlich sein, den Namen Ihres Geräts zu ändern. Sie tun dies im Dashboard:

1. Öffnen Sie das Menü 'devices' unter 'My organization'.

accopt-sisterant		0 :
AND HELE	Devisionant	
Pase More More More More Mare	Azztaly dia kiai month Tota summar diapani 300 Tota giume 2 mai	
Dener 20 Denue de Manuerer]	

2. Sie sehen nun eine Übersicht, in der das neue Gerät hinzugefügt wurde.

Reducept					
MENU	Devices	Logged in player	Log in/aul	Last usage at	Q III ADD DEVICE
MY ORGANISATION	Mke	Test Tao	SIGN OUT	17 September 2020 13:04	OPEN
Player groups Staff	Boyd John Doe	None	LOGIN	11 October 2019 14:30 31 July 2019 15:09	OPEN
Devices My organisation Search	Lisa	None	LOGIN	18 June 2019 16:12	OPEN
w. coardi	Oculus Quest	None	LOGIN	4 April 2020 20:10	OPEN Rows per page 10 = 1-10 of 54 < >



3. Klicken Sie auf 'Open'.

Reducept					@ 1
MENU Mene	Devices	Tenned Inclusion	Contractor -		
MY ORGANISATION	Mks	Toot Too	SIGN OUT	17 September 2020 13:04	OPEN
Player groups	Boyd	None	LOOIN	11 October 2015 14:30	OPEN
GO Devices	John Dee	None	LOGIN	31 July 2019 15:09	OPEN
亂 My organisation	Lisa	None	LOGIN	18 June 2019 16:12	OFEN
Q, Search	Oculus Quest	None	LOGIN	4 April 2020 20:10	OPEN
					Rows per page 10 = 1-30 of 54 C >

4. Es erscheint ein Dialogfeld mit den entsprechenden Informationen.

Device		
Oculus	Quest	
DELETE	CANCEL	SAVE

5. Sie können jetzt den Namen verändern und danach 'save' drücken.





Wie man Spieler auf einem Oculus-Go Apparat anund abmeldet

1. Öffnen Sie den Bildschirm 'devices' unter 'My organisation'. Sie sehen nun eine Geräteübersicht.

Reducept					۵ ب
MENU	Devices				
Home Home	Name	Logged in player	Log in/out	Last usage at	Actions
 Players 	Miko	Test Teo	SIGN OUT	17 September 2020 13:04	OPEN
21 Player groups	Boyd	None	LOGIN	11 October 2019 14:30	OPEN
Gi Devices	John Doe	None	LOGIN	31 July 2019 15:09	OPEN
My organisation	Lisa	None	LOGIN	18 June 2019 16:12	OPEN
Q. Search	Ocalus Quest	None	LOGIN	4 April 2020 20:10	OPEN
					Howsperpage 10 = 1-10 of 54 < >

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Login' neben dem Gerät, das Sie benutzen wollen.

							۲	-
MENU A	Devices				Q		D DEVIC	ε
MY ORBANISATION	Name	Logged in player	Log in/out	Last usage at	A	ctions		
🚊 Players	Mike	Test Tes	SION OUT	17 September 2020 13:04		OPEN		
25 Player groups	Boyd	None	LOGIN	11 October 2019 14:30		OPEN		
Stoff	John Dee	None	LOOIN	31 July 2019 15:09		OPEN		
My organisation	Lisa	None	LOGIN	18 June 2019 16:12		OPEN		
Q, Search	Oculus Quest	None		4 April 2020 20:10		OPEN		
)	Rowsperpage 10 -	1-10 of 54	<	*
-								

3. Wählen Sie den Namen des Spielers, bei dem Sie sich anmelden möchten, und klicken Sie auf 'Save'.

Page 12/24

	Ľ	OGIN
Login		GIN
 Player		
	~	DGIN
CANCEL	SAVE	GIN

4. Der gewählte Spieler ist jetzt verbunden mit dem Gerät.

Wie man die private Nutzung erlaubt

1. Öffnen Sie den Bildschirm 'Players' unter 'My organisation'. Sie sehen den Bildschirm mit der Spielübersicht.

Reduc	cept dashboard		0	-
ME	10	Dashboard		
★ MY	Home ORGANISATION Players	Activity the last month Total number of players: 202 Total playtime: 2 days		
0 6	Prayer groups Staff Devices My organisation			

2. In der Spielübersicht, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Open' für den neuen Spieler.

nomo	Players					Q, III	=	OD PLAYE
Players	First name	Last name	Group	Last used 4	Active until		Actions	
Player groups	213	123			27 Mar 2021		OPEN	
Statt	Daniel	Jack			17 Dec 2020	-	OPEN	
Devices My organisation	D Tom	Bolten			17 Dec 2020		OPEN	
	Jack	Downing			17 Dec 2020		OPEN	
					Hows per p	age 10 -	1-4 of 4	ς.

Page 14/24

R

3. Klicken Sie auf 'Edit'.

educept		⊕ ≛
NENU	John Doe	Eor
A Homa	Period selection	
2 Players	Date from	Date until
Player groups	(frant)	
⊖ Staff		
Len Devices		
My organisation		
Q, Search	Λ	
	Summary	

4. Drücken Sie auf die Schaltfläche 'Activate home use' und geben Sie die E-mail -Adresse an.

First name * John	Last name * Doe
Email	
Group	ş
Status unknown	
PROLONG WITH 3	MONTHS
Allow home u	ISAGE HOME USAGE DISABLED

Page 15/24

5. Sie sehen nun, wie sich der Knopf von rot auf grün ändert. Klicken Sie jetzt auf 'Save'.

First name*	Last name *
John	Doe
Email*	
Johndoe@gmail.co	om
Group	
Status	
unknown	
PROLONG WITH 3	MONTHS
	The second s

6. Der Spieler erhält eine E-Mail mit Anweisungen zur Erstellung eines Reducept-Kontos für den Privatgebrauch.

Wie man eine Lizenz erneuert

1. Öffnen Sie den Bildschirm 'Players' unter 'My organisation'. Sie sehen die Spielübersicht.

oduo	ept dashboard		•	*
MEN	10	Dashboard		
n MY	Home	Activity the last month		
1	Players	Total number of players: 202 Total playtime: 2 daya		
ж	Player groups			
θ	Staff			
60	Devices			
邸	My organisation			

- MENU Licenses: 3 / 10 per month (until 27 September 2020) A Home Players: Q, 111 T ADD PLAY MY ORGANISATION Actions First name Last used 4 Active until Last name Group 2 Players 213 123 27 Mar 2021 OPEN Player groups \varTheta Staff Daniel 17 Dec 2020 OPEN Jack • Devices Tom 17 Dec 2020 OPEN Bolten My organisation Jack 17 Dec 2020 OPEN Downing 1-4 cf 4 Hows per page 10 -
- 2. Klicken Sie in der Spielübersicht auf 'open' für den neuen Spieler.

× . 0

3. Klicken Sie auf 'Edit'.

Reducept	•	-
MENU	John Doe	EDIT
Home MY ORGANISATION	Period selection	
2 Players	Date from Date until	
Player groups	heat	
⊖ Staff		
Len Devices		
My organisation		
Q, Search	Λ	
	Summary	

4. Klicken Sie auf 'Prolong with 3 months', um die Lizenz für drei Monate zu verlängern.

lohn	Last name*
John	
Email* Johndoe@gmail.com	۹
Group	
Statue	
unknown	
PROLONG WITH 3 MON	лтнs 🔶
THOEONG WITH O MOI	

Page 18/24

5. Klicken Sie auf 'Save'.

There is a second second	Last name *
John	Doe
Email *	
Johndoe@gmail.	com
Group	
Status	
unknown	
PROLONG WITH	3 MONTHS

Page 19/24

. 0

Wie man die Spracheinstellungen ändert

1. Wählen Sie dieses hervorgehobene Symbol in der Symbolleiste.

		i dishboard.reducept.com	0	• 4 ¢ +
Reducept dashboard				
MENU	Dashboard			
n Home				
MY ORGANISATION	Activity the last month Total number of players: 214 Total playtime: 2 days			
A Player groups				
⊖ Staff				
(e) Devices				
i My organisation				

2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.



3. Das war es schon!

Page 20/24

Wie man mehrere Spieler auf einmal löscht

1. Öffnen Sie den Bildschirm 'Players' unter 'My organisation'. Sie sehen die Spielübersicht.

10000 0			ii deal-board.reducept.com	6	0 0 0 0
Reduc	cept dashboard				۵ ±
ME	10	Dashboard			
A NV		Activity the last month			
1	Players	Total number of players: 202 Total playtime: 2 claya			
т. Ө	Player groups Staff				
120	Devices				
聶	My organisation				

2. Wählen Sie mit Hilfe des Kästchens ganz links jeden Spieler aus, den Sie löschen möchten

ENU	Lice	nses: 3 / 10 per month	(until 27 September 2020)				
Home	P	layers					Q III ᆕ ADD PLAYE
Players	0	First name	Last name	Group	Lest used 4	Active until	Actions
Player groups		213	123			27 Mar 2021	OPEN
Staff	-+ 0	Danieł	Jack			17 Dec 2020	OPEN
My organisation	-> 🗆	Torry	Bolten			17 Dec 2020	OPEN
		Jack	Downing			17 Dec 2020	OPEN
						Rows per p	age 10 = 1-4 of 4 C

Page 21/24

3. Klicken Sie dann in der rechten oberen Ecke auf das Löschen-Symbol, gefolgt von einem 'Yes' im Bestätigungsfeld

Reducept dashboard						
MENU	Licenses: 3 / 10 per month	(until 27 September 2020)				
A Home	2 row(s) selected					
MY ORGANISATION	First name	Last name	Group	Last used \checkmark	Active until	Actions
Player groups	213	123			27 Mar 2021	OPEN
🕒 Staff	Daniel	Jack			17 Dec 2020	OPEN
Log Devices	I Tom	Bolten			17 Dec 2020	OPEN
	Jack	Downing			17 Dec 2020	OPEN
					Rows per page 10 +	1-4 pt 4 C >

4. Wählen Sie die gewünschte Option.



5. Fertig!

Wie man die Daten sortiert

1. Öffnen Sie den Bildschirm 'Players' unter 'My organisation'. Sie sehen die Spielübersicht.

Redu	cept dashboard		4
ME MY	NU Home ORGANISATION Playets	Dashboard Activity the last month Total number of players: 202 Total playtime: 2 days	
0 G	Player groups Staff Devices My organisation		

2. Klicken Sie auf eine Spalte, die über dem Spaltennamen einen "Sortiertipp"/Filter anzeigt.

Reducept dashboard						≞ ©
MENU	Licenses: 3 / 10 per month (u	mfil 27 September 2020)				
in Homa	Players					
Players	First name	Last name	Group	Last used $\stackrel{\oplus}{=}$	Active until	Actions
11 Player groups	213	123			27 Mar 2021	OPEN
e Statt	Daniel	Jack			17 Dec 2020	OPEN
LeD Devices	Tom	Bolten			17 Dec 2020	OPEN
	Jack	Downing			17 Dec 2020	OPEN
					Hows p	erpage 10 - 1-4 of 4 < >

Page 23/24

3. Sie können sich dann die sortierte Liste in der von Ihnen gewünschten Form ansehen.

Reducept dashboard						œ	2
MENU	Licenses: 3 / 10 per month (until 2	7 September 2020)					
Home Home	Players						AYER
Players	First name *	Last name	Group	Last used	Active until	Actions	
22 Player groups	213	123			27 Mar 2021	OPEN	
Staff Devices	Daniel	Jack			17 Dec 2020	OPEN	
品 My organisation	dack	Downing			17 Dec 2020	OPEN	
	Tom	Bolten			17 Dec 2020	OPEN	
					Rows	per page 10 = 1-4 of 4 <	3

Page 24/24